

SAUFLON

ALL IN ONE

light



ALL
IN
ONE
light

Caractéristiques

Avantages

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Solution multifonctions très efficace. | <ul style="list-style-type: none">• Plus performante que les autres solutions multifonctions en termes d'action nettoyante et d'activité antimicrobienne. |
| <ul style="list-style-type: none">• Efficacité cliniquement prouvée. | <ul style="list-style-type: none">• Les patients bénéficient d'une solution très efficace et confortable pour nettoyer leurs lentilles de contact. |
| <ul style="list-style-type: none">• Contient un agent lubrifiant. | <ul style="list-style-type: none">• Améliore le confort de port des lentilles de contact et les empêche de s'assécher. |
| <ul style="list-style-type: none">• Spécialement formulée pour les yeux sensibles. | <ul style="list-style-type: none">• Excellente tolérance par les patients. |
| <ul style="list-style-type: none">• Multifonctions. | <ul style="list-style-type: none">• Elimine les dépôts de protéines, de lipides et de calcium ; efficacité prouvée contre l'acanthamoeba. |
| <ul style="list-style-type: none">• Convient à tous les types de lentilles de contact, y compris les lentilles en silicone-hydrogel. | <ul style="list-style-type: none">• Meilleur suivi des différentes étapes de l'entretien des lentilles. |

Evaluation des médecins

« Sans aucun doute la solution la plus efficace que j'ai utilisée jusqu'à présent au sein de notre cabinet. Même les patients aux yeux sensibles ne ressentent aucune gêne et ceux dont les lentilles de contact s'asséchaient en fin de port ont signalé que cela n'était plus le cas. »




Source: Evaluation des médecins (données sur fichier)

Performances cliniques

La solution Sauflon All in One Light s'est avérée encore plus performante que les produits de contrôle dans le cadre d'une étude clinique de six mois menée aux fins d'obtenir l'approbation de la FDA . Cette étude a également révélé que ce produit était non seulement très efficace mais aussi un excellent nettoyant.

(données sur fichier)






Activité antibactérienne – durée d'élimination (heures)

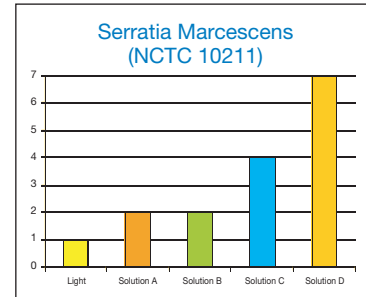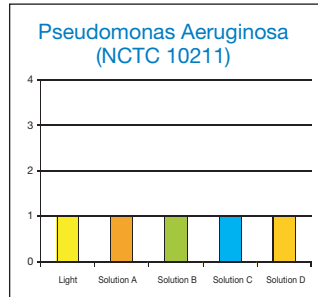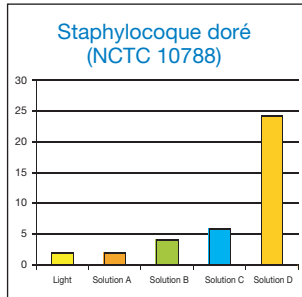

Pas de réaction chez les patients

Dans le cadre de l'enregistrement FDA, une étude clinique de 6 mois a été menée dans 12 sites d'investigation au Etats-Unis et au Canada sur 363 patients.

Comparaison de All In One Light par rapport aux produits de contrôle (résultats bio-microscopiques)

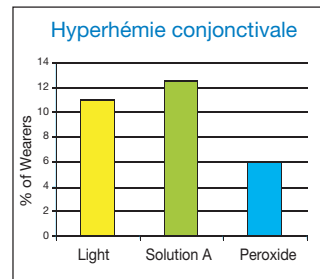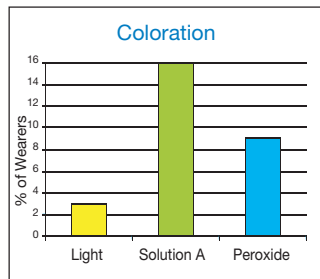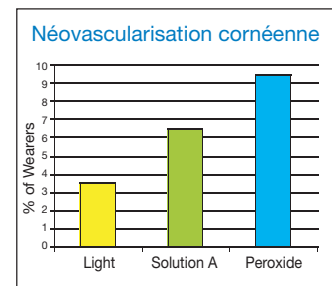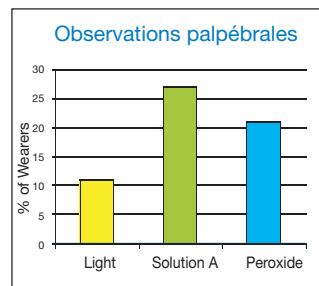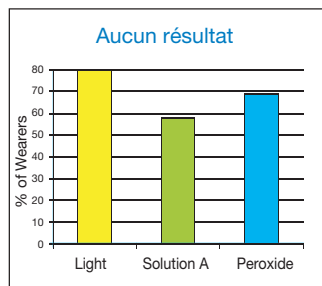

Sélection de symptômes, problèmes et affections

