

SAUFLON

CyClean®



CyClean®

Caractéristiques

Avantages

- Etui de trempage antibactérien de conception nouvelle.
- L'étui CyClean® - « Tourner le bouchon - la lentille est nettoyée », ce qui signifie moins de manipulation donc une meilleure hygiène et moins de risques d'endommagement.
- L'étui CyClean® garantit le nettoyage de toute la surface de la lentille sans avoir besoin de masser et rincer.
- La paroi antibactérienne interne de l'étui garantit un environnement de trempage propre.
- Contient Biopol™.
- Le Biopol™ améliore l'efficacité de la décontamination et l'élimination plus rapide des germes pathogènes, y compris acanthamoeba.
- Solution multifonctions formule améliorée.
- Cette formule unique assure un très bon confort de port et réduit le taux d'abandon grâce à une satisfaction accrue des patients.
- Utilisable avec toutes les lentilles, y compris les lentilles en silicone-hydrogel.
- Meilleur suivi des différentes étapes de l'entretien.

L'effet Biopol™

Le **Biopol™** est un mélange synergique unique d'ingrédients actifs développé par Sauflon pour améliorer le nettoyage, la décontamination et le confort.



Tourner le bouchon ...



... La lentille est nettoyée !


CyClean®

CyClean®

Meilleur nettoyage


Le graphique 1 montre que CyClean® élimine plus de protéines que les produits comparables.

Graphique 1

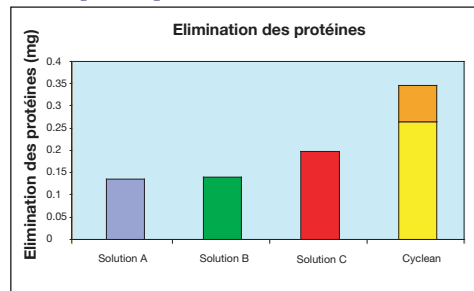

Le graphique 2 montre que CyClean® est extrêmement efficace pour la dissolution des lipides qui se trouvent sur la lentille.

Graphique 2

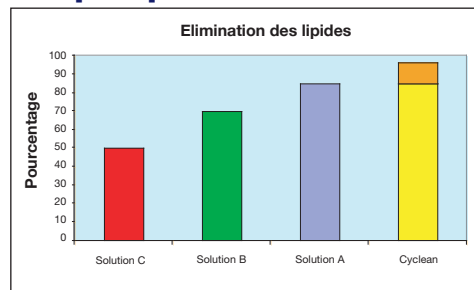


L'effet rotatif de l'étui augmente encore l'efficacité de CyClean® de 30 %.

Meilleure décontamination


Après une inoculation de 1 000 000 (6 log) de chaque micro-organisme, le graphique 3 montre l'élimination de chaque micro-organisme en fonction des recommandations d'heures de trempage du fabricant. (6 log = élimination totale)

Graphique 3

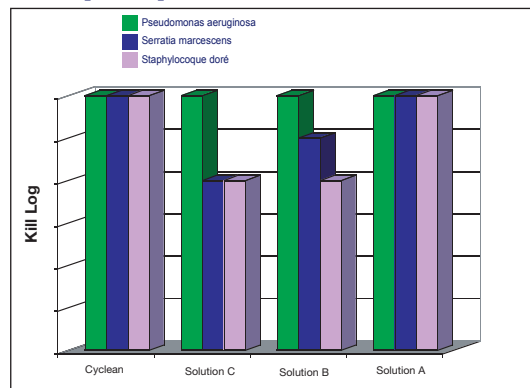

Elimination de Acanthamoeba

Les études indépendantes menées par l'université de Leicester ont révélé que CyClean® est efficace contre la forme kyste la plus résistante de l'acanthamoeba.

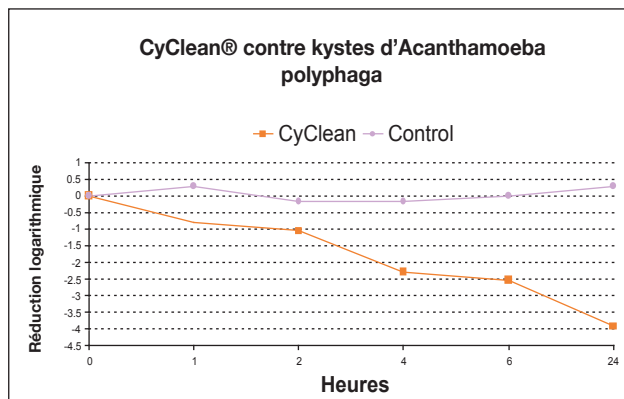

Meilleur confort

La combinaison synergique des ingrédients actifs dans Biopol™ augmente le confort de port par lubrification et mouillage de la surface de la lentille.