

SAUFLON

COMFORT DROPS

Para los usuarios de lentes de contacto



- 💧 **Mejora la comodidad de uso**
- 💧 **Prolonga la duración de uso**
- 💧 **Lubrica la lentilla**
- 💧 **Puede utilizarse mientras se usan las lentes de contacto**
- 💧 **Conviene a todos los tipos de lentes de contacto**
- 💧 **Excelente relación calidad y precio**

 SAUFLON

Sauflon Pharmaceuticals

1 Rue Séjourné, 94000 Créteil

Telephone 01 48 53 63 75 Fax 01 49 56 07 31



COLOCACIÓN DE LA LENTILLA

Todas las lentes de contacto blandas: para conseguir una comodidad óptima, vierta algunas gotas sobre la lentilla.

Lentes de contacto diarias desechables: puede ser importante porque no se proporciona ninguna solución que facilite la colocación.

Lentes de contacto duras: eche algunas gotas en ambas caras de la lente antes de colocarlas para mejorar la comodidad.



COMODIDAD DE USO MEJORADA

Comodidad de uso considerablemente mejorada con todas las lentes de contacto blandas, sobre todo las tóricas y las fabricadas con material iónico.



PROLONGACIÓN DE LA DURACIÓN DE USO

Al final del día, la deshidratación de las lentes de contacto puede producir una sensación molesta, sobre todo con las lentes de contacto tóricas y las fabricadas con material iónico.

Se recomienda el uso de las gotas Comfort Drops de Sauflon a los usuarios de lentillas diarias desechables que las usen hasta muy tarde por la noche.



ACUIDAD VISUAL MEJORADA

Se aprecia una disminución de la acuidad visual con todas las lentes de contacto blandas debido a las modificaciones de los parámetros asociadas con la deshidratación.

Se puede leer una línea más de caracteres gracias a las gotas Comfort Drops de Sauflon, incluso más con las lentes de contacto tóricas.



EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

Un producto con una excelente calidad deliberadamente propuesto a un precio muy bajo para fomentar una utilización regular.