

SAUFLON

CyClean®



Características

Ventajas

- Estuche de remojo antibacteriano de nuevo diseño.

- El estuche CyClean® «Gira el tapón y se limpia la lentilla», supone menos manipulación, por tanto, más higiene y menos riesgos de daño.
- El estuche CyClean® garantiza la limpieza de toda la superficie de la lente sin necesidad de masajear ni aclarar.
- La pared antibacteriana interna de estuche garantiza un entorno de remojo limpio.

- Contiene Biopol™.

- Biopol™ mejora la eficacia de la desinfección y una eliminación más rápida de los gérmenes patógenos, incluida la Acanthamoeba.

- Solución multifunción con fórmula mejorada.

- Una fórmula única que garantiza mucha comodidad de uso y reduce la tasa de abandono gracias a una satisfacción elevada de los pacientes.

- Puede usarse con toda tipo de lentes de contacto, incluidas las de hidrogel de silicona.

- Mejor seguimiento de las diferentes fases de mantenimiento de las lentes de contacto.

Efecto Biopol™

Biopol™ es una mezcla sinérgica única de ingredientes activos desarrollada por Sauflon para mejorar la limpieza, desinfección y comodidad.




CyClean®

Mejor limpieza


El gráfico 1 demuestra que CyClean® elimina más proteínas que otros productos comparables.

Gráfico 1

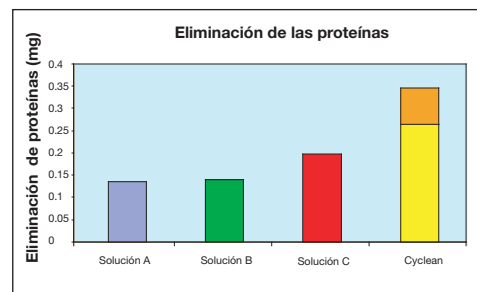

El gráfico 2 demuestra que CyClean® es extremadamente eficaz en la disolución de los lípidos que se encuentran en la lente de contacto.

Gráfico 2

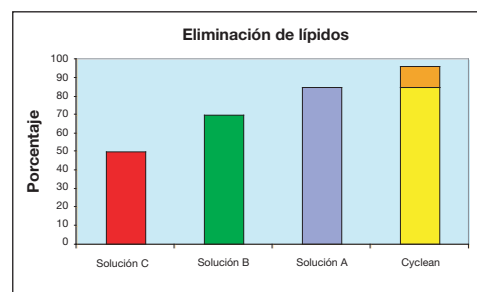


El efecto rotativo del estuche aumenta la eficacia de CyClean® en un 30 %.

Mejor desinfección

Tras una inoculación de 1 000 000 (6 logaritmos) de cada microorganismo, el gráfico 3 muestra la eliminación de cada microorganismo en función de las recomendaciones de horas de remojo del fabricante. (6 logaritmos = eliminación total)


Gráfico 3

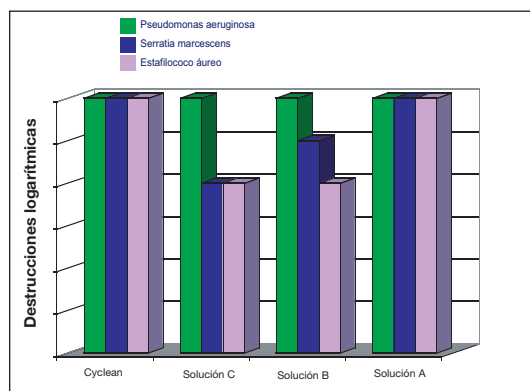

Eliminación de Acanthamoeba

Estudios independientes realizados por la universidad de Leicester han demostrado que CyClean® es eficaz contra el quiste más resistente de la Acanthamoeba.

CyClean® contra los quistes de Acanthamoeba polyphaga

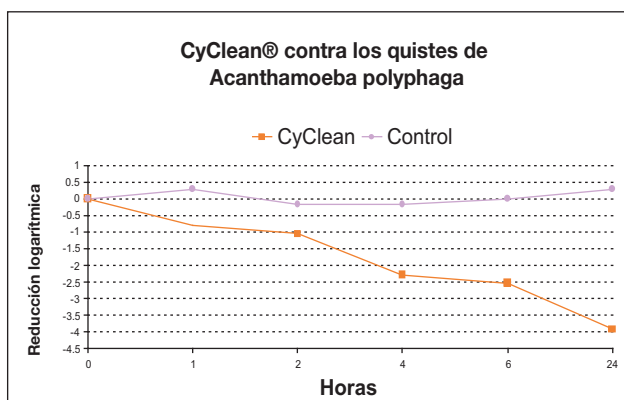

Mayor comodidad

La combinación sinérgica de los ingredientes activos de Biopol™ aumenta la comodidad de uso por la lubricación y la humedad de la superficie de la lentilla.