

# SAUFLON

# One Step



## Características


## Ventajas

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Contiene un surfactante no iónico.</li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Se activa durante las primeras etapas de la neutralización cuando se produce la limpieza de efecto vórtice, y no necesita una limpieza manual.</li></ul>                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Contiene peróxido de oxígeno en un 3 %.</li></ul>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• La solución desinfectante preferida para las lentes de contacto.</li><li>• Elimina los quistes de Acanthamoeba.</li><li>• Elimina los residuos de lípidos y proteínas.</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Neutralización por disco de platino.</li></ul>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• El peróxido de hidrógeno queda totalmente neutralizado en 6 horas o toda la noche.</li></ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Solución sin conservantes.</li></ul>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Elimina los riesgos de absorción de conservantes durante el remojo.</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Contiene un agente lubricante.</li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mejora la comodidad de uso.</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Incluye un estuche para lentillas antibacteriano.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• La pared antibacteriana interna del estuche Multi garantiza un entorno de remojo limpio.</li></ul>   |

La solución *One Step* de Saufion responde a todas las expectativas de los médicos: eficaz, sencilla, segura, económico y fácil de utilizar. Un auténtico producto en una sola etapa.

# One Step

La solución One Step de Sauflon contiene un surfactante no iónico que se activa durante las primeras etapas de neutralización cuando se produce una limpieza de efecto vórtice.

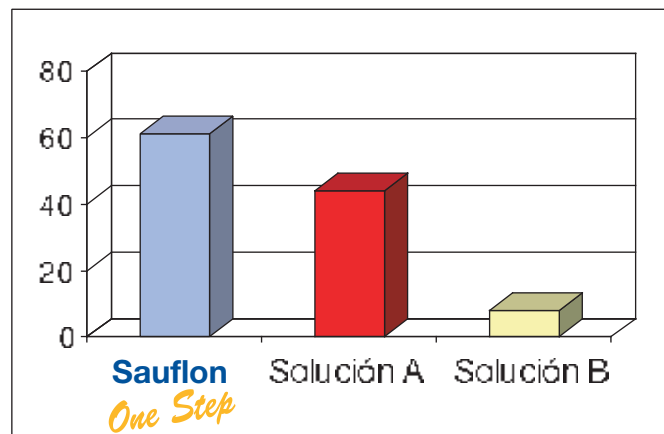

## La solución One Step de Sauflon limpia tan bien como un sistema en cuatro etapas

«Unos estudios independientes han demostrado que el remojo toda la noche en la solución One Step limpia tan bien como la solución oxidante de control de cuatro etapas: limpieza, aclarado, desinfección y aclarado final».

Fuente: Estudio clínico independiente de la universidad del Reino Unido (datos de archivo).

## Limpia toda la superficie de la lentilla y no solo la zona central

El efecto vórtice que se crea con la liberación de oxígeno al principio de la neutralización limpia toda la superficie de la lentilla.



Los pacientes que masajean sus lentes de contacto tienden a evitar los bordes por miedo a dañar la lentilla.



La solución One Step no solo limpia la zona central sino la lente entera.

## Sin conservantes

Ideal para los pacientes que necesiten una solución para lentes de contacto sin conservantes.