

SAUFLON



synergi



Solución multifunción innovadora sin conservantes y con un complejo de triple efecto: Oxipol™
Oxipol™ crea un efecto sinérgico de limpieza, desinfección y lubricación.

Características

Ventajas

- Sin conservantes.

- Sin absorción de conservantes en la superficie de la lente de contacto, muy adecuado para lente de hidrogel de silicona.

- Las sustancias desinfectantes de Oxipol™ se transforman en oxígeno, sal y agua.

- Sin absorción de conservantes en la superficie de la lente de contacto, muy adecuado para lente de hidrogel de silicona.

- El componente lubricante de Oxipol™ garantiza la humectabilidad de la lente de contacto.

- Impresión de comodidad desde la colocación de las lentes de contacto.

- La fórmula Synergi contiene hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC).

- Mejora la comodidad de uso durante todo el día.

- Rendimiento de desinfección excepcional.

- Eficacia demostrada contra los gérmenes oculares patógenos.

- Synergi se recomienda para ojos sensibles.

- Crecimiento potencial de tolerancia y compatibilidad entre los pacientes.

- Para mejorar la higiene de sus lentillas, se recomienda masajearlas y enjuagarlas.

- Synergi elimina los residuos de lípidos, proteínas y demás de la superficie de la lente de contacto.


- Synergi es una solución segura que no irrita y rehidrata las lentes de contacto durante el uso.

- Garantiza un uso cómodo durante todo el día de uso recomendado.

- Estuche antimicrobiano

- La eficacia antimicrobiana del estuche completa la de la solución, impide la formación de biopelícula y presenta una seguridad suplementaria para el paciente.

Reducción logarítmica de microorganismos: media en función de las recomendaciones horarias de remojo de los fabricantes.

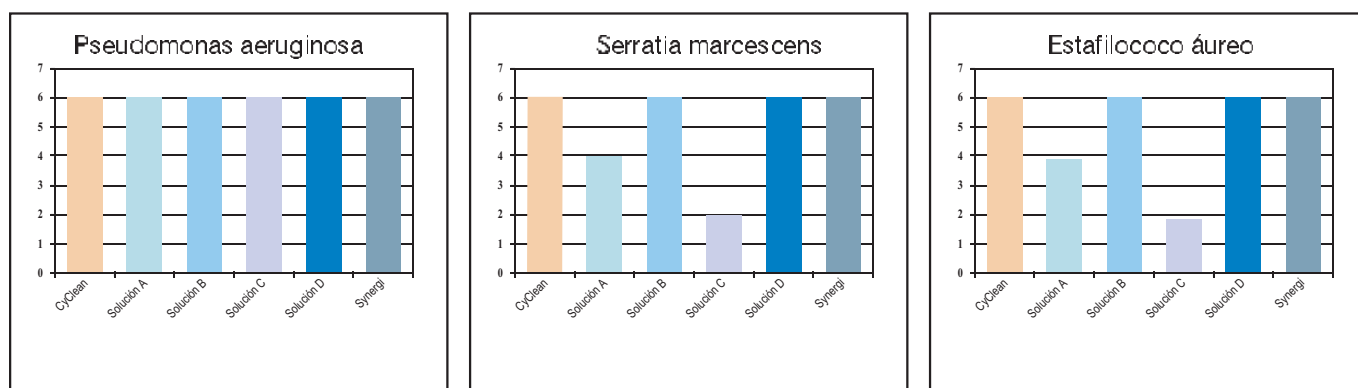

Tras una inoculación de 1 000 000 (6 logaritmos) de cada microorganismo, los gráficos anteriores muestran la eliminación de cada microorganismo en función de las recomendaciones horarias de remojo de los fabricantes.

Prueba conforme a la norma ISO/CEN 14729.

Estuche de remojo antimicrobiano

Para maximizar la seguridad de los pacientes y minimizar la transferencia de organismos bacterianos del estuche a la lente y de esta al ojo, la solución Synergi se suministra con un estuche de remojo antimicrobiano. Dicho estuche de remojo está fabricado con un material que contiene iones argénticos inorgánicos. Se sabe hace años que la plata posee propiedades antimicrobianas.

Los resultados de las pruebas han demostrado que el estuche de las lentes de contacto por sí solo era eficaz contra los microorganismos patógenos oculares estándar. La presencia de aditivos de plata permite asimismo prevenir la acumulación de biopelícula en el estuche y proporciona más seguridad al usuario.